





MAP Kits

Die MAP Kits (MAP System) dürfen nur von qualifiziertem Personal in Universitätskliniken und Zahnarztpraxen benutzt werden. Das MAP System dient zur manuellen Platzierung von endodontischem Reparaturmaterial PD™ MTA White.

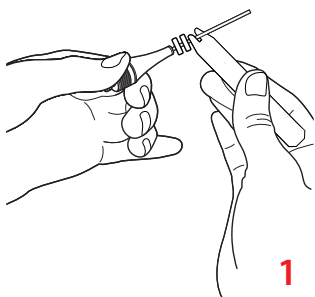


1

Stülpen Sie einen oder mehrere Silikonstopper mit dem Schlüssel auf die Spitze der entsprechenden Nadel.

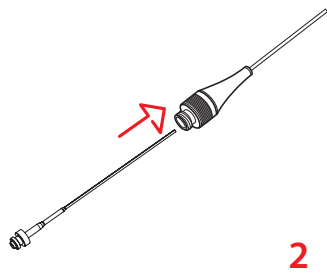


2

Schieben Sie einen Plastikkolben in die Nadel.

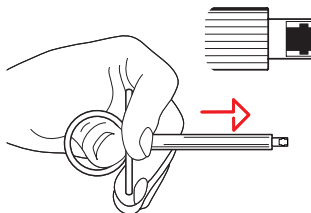


3

Drücken Sie den Kolben der MAP-Spritze so, dass die Bajonettspitze erscheint.

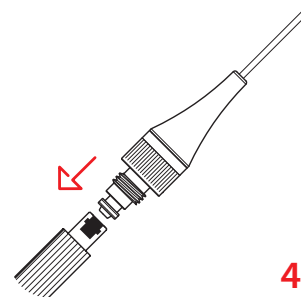


4

Setzen Sie das Kolben-Bajonettssystem zusammen und lassen Sie den Spritzenkolben los.

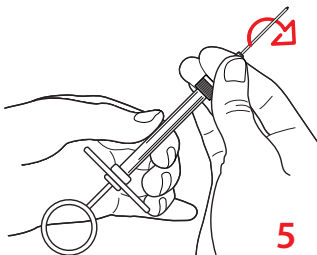


5

Schrauben Sie den Kopf auf die Spritze. Wenn eine NiTi Memory Shape Nadel verwendet wird, biegen Sie diese in die gewünschte Form.

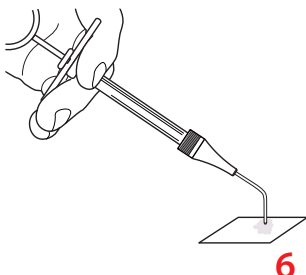


6

Bereiten Sie das Reparaturmaterial auf einer Glasplatte vor und geben Sie die benötigte Materialmenge in den Spender. Drücken Sie den Nadelkopf mehrmals in das Reparaturmaterial sodass dieser befüllt wird.

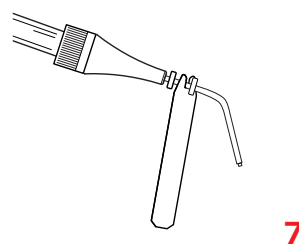


7

Entfernen Sie überschüssiges Material, indem Sie einen Silikonstopper über den Nadelkopf ziehen.

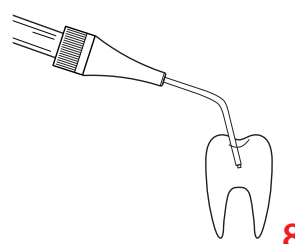


8

Drücken Sie auf den Spritzenkolben um das Material an der gewünschten Stelle anzubringen. Die Nadel bei Bedarf wie beschrieben neu befüllen.

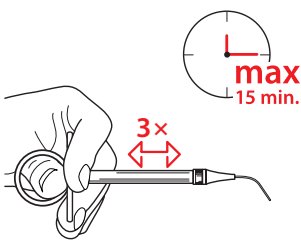


9

Nach abgeschlossener Platzierung des Materials muss das Restmaterial innert 15 Min. aus der Nadel hinausgedrückt werden. Drücken Sie 3x den Spritzenkolben und Entfernen Sie überschüssiges Material.

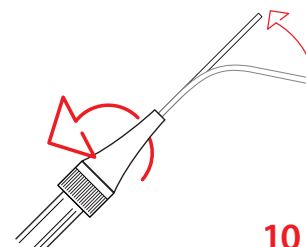


10

Wenn eine NiTi Memory Shape Nadel verwendet wurde, richten Sie diese manuell gerade. Schrauben Sie den Spritzenkopf ab.

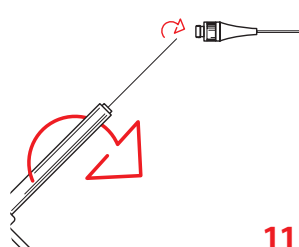


11

Drücken Sie den Spritzenkolben und nehmen Sie den Plastikkolben aus dem Bajonettssystem.

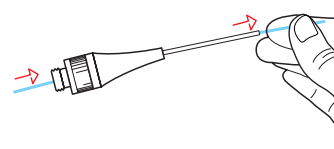


12

Reinigen Sie die Innenseite des Kopfes mit einer steifen Einfädler-Zahnseide wie EMOFORM TrioFloss oder ProxySoft 3 in1 Floss. Weitere Informationen finden Sie unter Schritt Nummer 1 des Wiederaufbereitungsprotokolls.

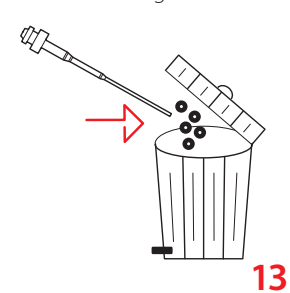

13

Entfernen und entsorgen Sie alle gebrauchten oder verbleibenden Silikonstopper.

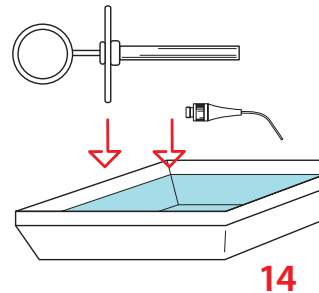

14

Reinigen Sie alle anderen Teile sofort um sämtliches Restmaterial zu entfernen. Hinweis: Die Plastikkolben müssen nach einmaligem Gebrauch entsorgt und ersetzt werden.

Vorsichtsmaßnahmen Vor Gebrauch:

Der Einweg-Plastikkolben muss vor Gebrauch gereinigt und desinfiziert werden. Die Sterilisation von wiederverwendeten Instrumenten ist vor der Verwendung unerlässlich.

Nach Gebrauch:

Reinigen Sie den Spritzenkopf innerhalb von 15 Minuten mit einer steifen Einfädler-Zahnseide wie EMOFORM TrioFloss oder ProxySoft 3 in1 Floss. Andernfalls kann es sehr schwierig oder sogar unmöglich werden, das Gerät zu entsperren und zu reinigen.