





MAP Kits


Les kits MAP (MAP System) sont utilisés dans les hôpitaux, les cliniques ou les cabinets dentaires par un personnel dentaire qualifié. Le MAP System est conçu pour la mise en place manuelle du matériau de réparation endodontique PD™ MTA White.

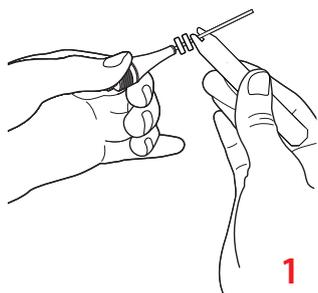


1 Placer un ou plusieurs anneaux de nettoyage en silicone sur la pointe de l'aiguille correspondante à l'aide de la clé.

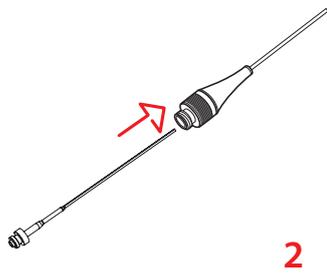


2 Insérer un piston en plastique dans l'aiguille correspondante.

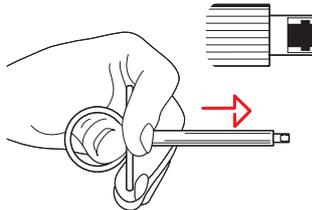


3 Appuyer sur le poussoir de la seringue MAP de façon à ce que l'extrémité de la baïonnette apparaisse.

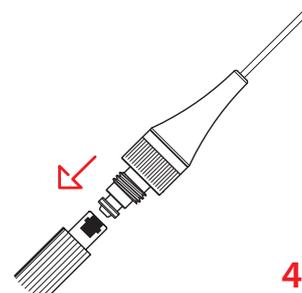


4 Y adapter le contre-système baïonnette du piston. Relâcher le poussoir.

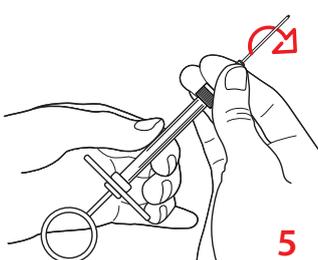


5 Visser la tête de l'aiguille dans la seringue. En cas d'utilisation d'une aiguille *NiTi Memory Shape*, ajuster manuellement la forme de l'aiguille à la courbure souhaitée.

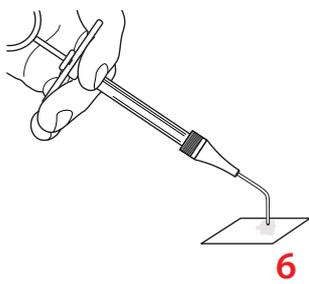


6 Préparer le matériau de réparation sur une plaque de verre et transférer la quantité requise de matériau dans le puits de remplissage. Introduire plusieurs fois la pointe (de l'aiguille) dans le matériau de réparation pour qu'il soit rempli.

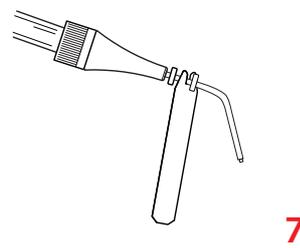


7 Enlever l'excès de matériau en faisant glisser un anneau de nettoyage en silicone à l'extérieur de l'extrémité de la pointe de l'aiguille.

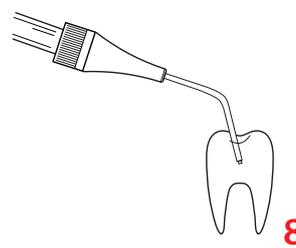


8 Presser le poussoir de la seringue pour expulser le matériel. Remplir à nouveau l'instrument si nécessaire.

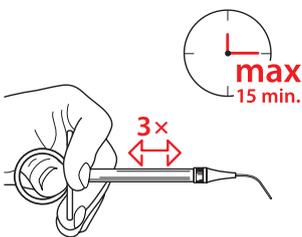


9 Lorsque le matériau a été entièrement placé, appuyer sur le piston de la seringue 3x dans les 15 min. qui suivent le traitement pour expulser l'excédent de matériau.

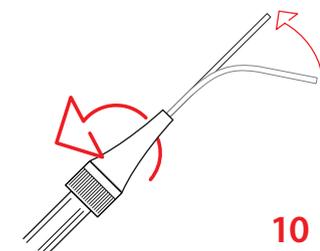


10 Si une aiguille *NiTi Memory Shape* est utilisée, redresser l'aiguille manuellement. Dévisser la tête.

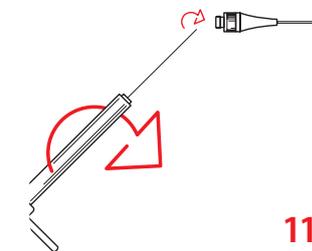


11 Appuyez sur le piston de la seringue et retirez le piston du système à baïonnette.

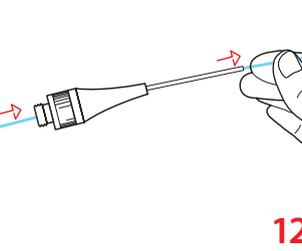

12 Nettoyez l'intérieur de la tête avec un fil dentaire rigide comme EMOFORM TrioFloss ou ProxySoft 3 in1 Floss. Pour plus de détails, voir l'étape numéro 1 du protocole de retraitement.

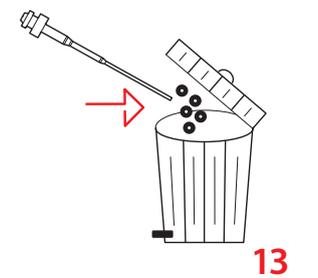

13 Enlevez et jetez tous les anneaux de nettoyage en silicone usagées ou restants.

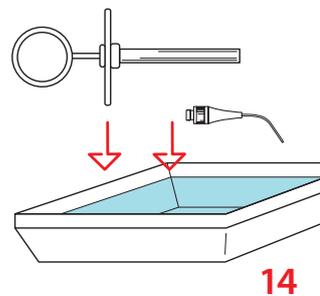

14 Nettoyez immédiatement toutes les autres pièces afin d'éliminer tout résidu de matière. Remarque: les pistons en plastique doivent être jetés après 1 utilisation et remplacés.

Précautions

Avant utilisation :

Le piston en plastique à usage unique doit être nettoyé et désinfecté avant utilisation.

La stérilisation des instruments réutilisés est essentielle avant leur utilisation.

Après utilisation :

Nettoyer l'intérieur de la tête dans les 15 min. avec un fil dentaire à extrémité rigide comme EMOFORM TrioFloss ou ProxySoft 3 in1 Floss. Si cela n'est pas fait, il peut être très difficile, voire impossible, de débloquer et de nettoyer le dispositif.